



โรงพยาบาลหัวหิน

วิธีปฏิบัติที่ WI - HTE 16 - 04

เรื่อง การดูแลและการเตรียมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ให้พร้อมใช้งาน

ผู้จัดทำ สิวิภา พูลพันธ์ (นางสาวสิวิภา พูลพันธ์) นักรังสีการแพทย์	วันที่ 5 เมษายน 2554
ทบทวนโดย (นางสาวอุทิศ ตันรัตนาวงศ์) หัวหน้ากลุ่มงานรังสีวิทยา	วันที่ 5 เมษายน 2554
อนุมัติโดย (นางสาวอภิรดี โชติกิตติพงศ์) หัวหน้ากลุ่มภารกิจระบบบริการสุขภาพ	วันที่ 5 เมษายน 2554

ฉบับที่ A

แก้ไขครั้งที่ 00

วันที่บังคับใช้ 5 เม.ย. 2554

สถานะเอกสาร :.....

เอกสารต้นฉบับ

วิธีปฏิบัติ โรงพยาบาลหัวหิน	เรื่อง การดูแลและการเตรียมเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ให้พร้อมใช้งาน	
	เอกสารเลขที่ WI - HTE 16 - 04	ฉบับที่ A แก้ไขครั้งที่ 00
	วันที่บังคับใช้ 5 เม.ย. 2554	หน้า 2 ของ 2

1. วัตถุประสงค์

เพื่อให้เครื่องพร้อมใช้งานไม่ติดขัด และยืดอายุการใช้งานของเครื่อง

2. ขั้นตอนการปฏิบัติ

2.1 การตรวจคุณภาพของเครื่องประจำวัน

- การเปิดเครื่องครั้งแรก ในแต่ละวัน ต้องมีการ Warm up เครื่องก่อนการใช้งาน และถ้าหากเครื่องไม่ได้ใช้ติดต่อกันนานเกิน 3 ชั่วโมง ควรมีการ Warm up เครื่องก่อนเสมอ
- ทำการตรวจสอบการเคลื่อนที่ของเตียง/Gantry ว่าทำงานได้ปกติ
- ทำความสะอาดบริเวณเตียง/Gantry ด้วยน้ำยาทำความสะอาด
- มีการตรวจสอบอุณหภูมิ และความชื้นในห้องให้เหมาะสม
- ปิดเครื่องหากไม่ได้ใช้เครื่องติดต่อกันนานเกิน 4 ชั่วโมง

2.2 การตรวจเช็คคุณภาพเครื่องประจำไตรมาส

- โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทเครื่อง

3. เกณฑ์ชี้วัด

เครื่องไม่สามารถใช้งานได้น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 ครั้งใน 1 เดือน

4. ผู้รับผิดชอบ

นักรังสีการแพทย์ / เจ้าหน้าที่งานรังสีการแพทย์ ที่หมุนเวียนไปประจำห้องนั้น